

ANVISNINGAR PÅ SVENSKA

⚠ VARNINGAR

INDIKATIONER:

INDIKERAD FÖR KRONISK FOTLEDSINSTABILITET, STUKNINGAR ELLER ANSPÄNNINGAR OCH SKYDD MOT VRIDNINGSSKADOR PÅ FOTLEDEN.

KONTRAIKATIONER:

KONTRAIKICERAT FÖR FRAKTURER I FOT OCH FOTLED.

VARNING: LÄMNA INTE PRODUKTEN NEDPACKAD I EN BIL EN VARM DAG UNDER NÅGON LÅNGRE TIDSPERIOD, OCH INTE HELLER PÅ NÅGON ANNAN PLATS DÄR TEMPERATUREN KAN ÖVERSTIGA 65°C (150°F). OM NÅGON YTTRELLIGARE SMÄRTA ELLER ANDRA SYMPTOM UPPSTÅR NÄR DEN HÄR ORTOSEN ANVÄNDS, AVBRYT ANVÄNDNINGEN OCH SÖK MEDICINSK VÅRD.

A. Placera ortosen. För in foten i ortosen och se till att tungan ligger mellan foten och snören.

B. Dra åt snören och säkra.

C. För snabb snörning, dra i flikarna och haka fast dem.

D. Vänd in foten något, linda medialremmen (inre rem) över överdelen och sedan under fotens bak tillbaka till medialsidan. Dra i remmen vertikalt tills fast medial (inre) spänning uppnås. Fäst remmen på medialsidan.

E. Vänd foten, linda sidoremmen (ytterremmen) över överdelen och sedan under foten tillbaka till yttersidan. Dra i remmen vertikalt tills fast sidospänning (yttre) uppnås. Fäst remmen på yttersidan.

F. Vik in och säkra vadremmen. Vik upp den övre remmen runt den vadens nedre del (överst på ortosen) och säkra.

DANSK VEJLEDNING

⚠ ADVARSLER

INDIKATIONER:

INDICERET TIL KRONISK ANKELUSTABILITET, -FORSTUVNINGER ELLER -FORVRIDNINGER SAMT BESKYTTELSE MOD INVERSIONS- OG EVERSIONSANKELSKADER.

KONTRAIKATIONER:

KONTRAIKICERET VED FOD- OG ANKELBRUD.

ADVARSEL: EFTERLAD IKKE DENNE ANORDNING I EN BIL PÅ EN VARM DAG ELLER PÅ ET ANDET STED, HVOR TEMPERATUREN KAN OVERSTIGE 65 °C (150 °F) I LÆNGERE TID. HVIS DER OPSTÅR YDERLIGERE SMERTER ELLER SYMPTOMER UNDER BRUG AF DENNE ORTOSE, SKAL DU AFBRYDE BRUGEN OG SØGE LÆGE.

A. Positionér ortosen. Indsæt foden i ortosen, idet det sikres, at tungen er placeret imellem toppen af foden og snorene.






B. Tilspænd snorene, og fastgør dem.

C. Hvis der anvendes hurtigsnore, skal der trækkes i tapperne og burrebåndet for at fastgøre dem.

D. Vend foden forsigtigt rundt, og før medialremmen (indvendig rem) over toppen og derefter under fodens bagside mod den mediale side. Træk remmen lodret opad, indtil en forsvarlig medial (indvendig) tilspænding er opnået. Fastgør remmen til den mediale side.

E. Vend foden rundt, og før lateralremmen (udvendig rem) over toppen og derefter under fodens bagside mod den laterale side. Træk remmen lodret opad, indtil en forsvarlig lateral (udvendig) tilspænding er opnået. Fastgør remmen til den laterale side.

F. Før lægremmen rundt om læggen, og fastgør den. Før den øvre rem rundt om den nedre læg (toppen af ortosen), og fastgør den.

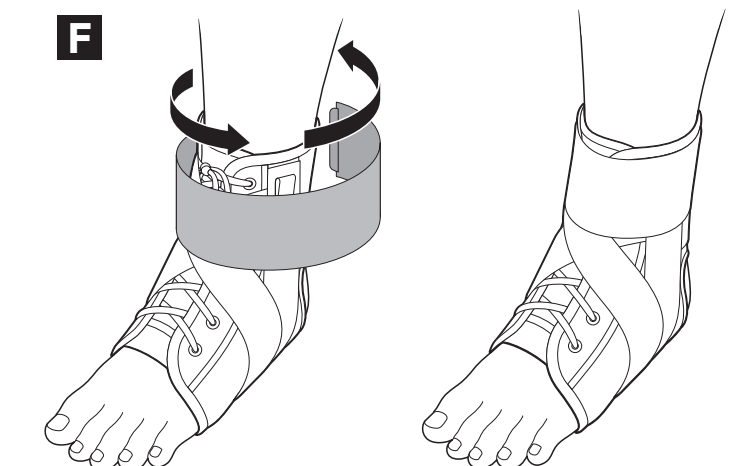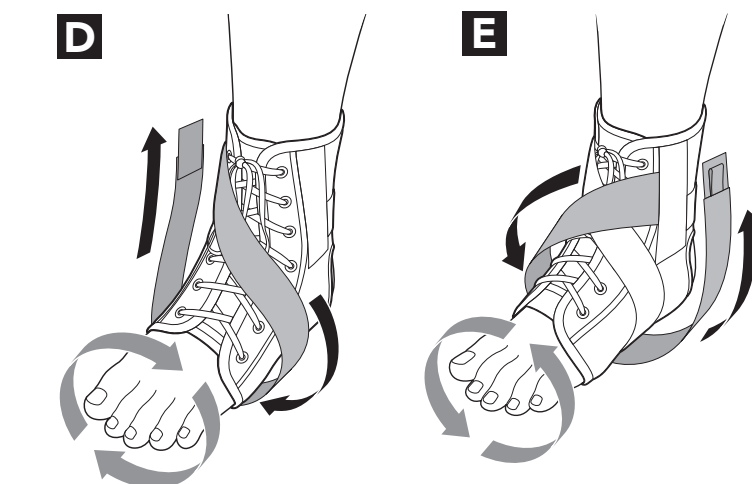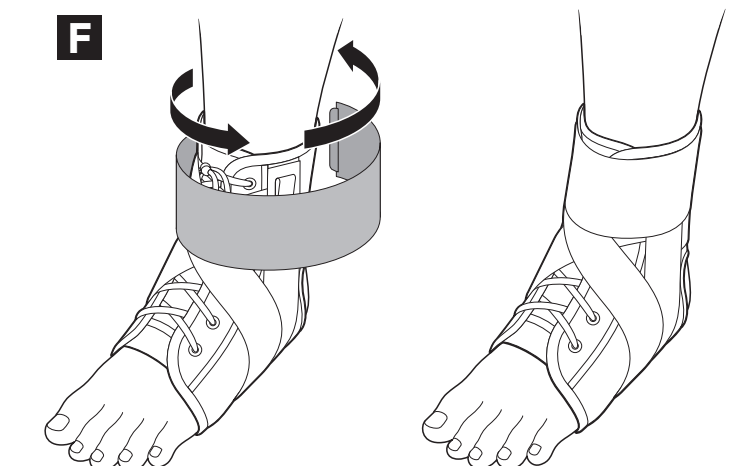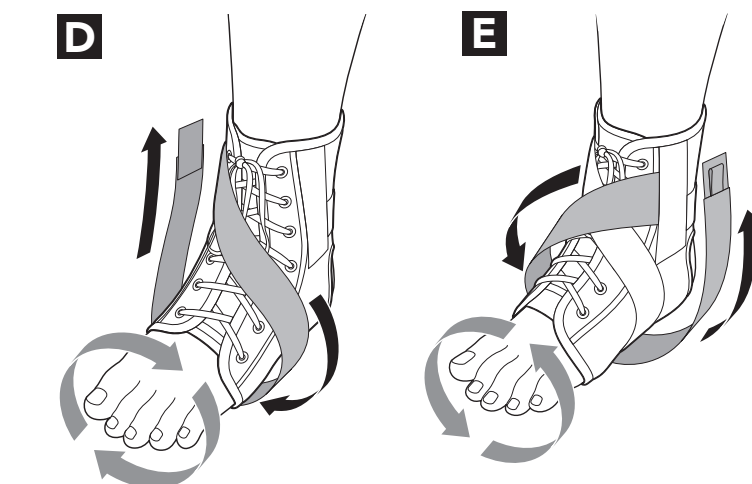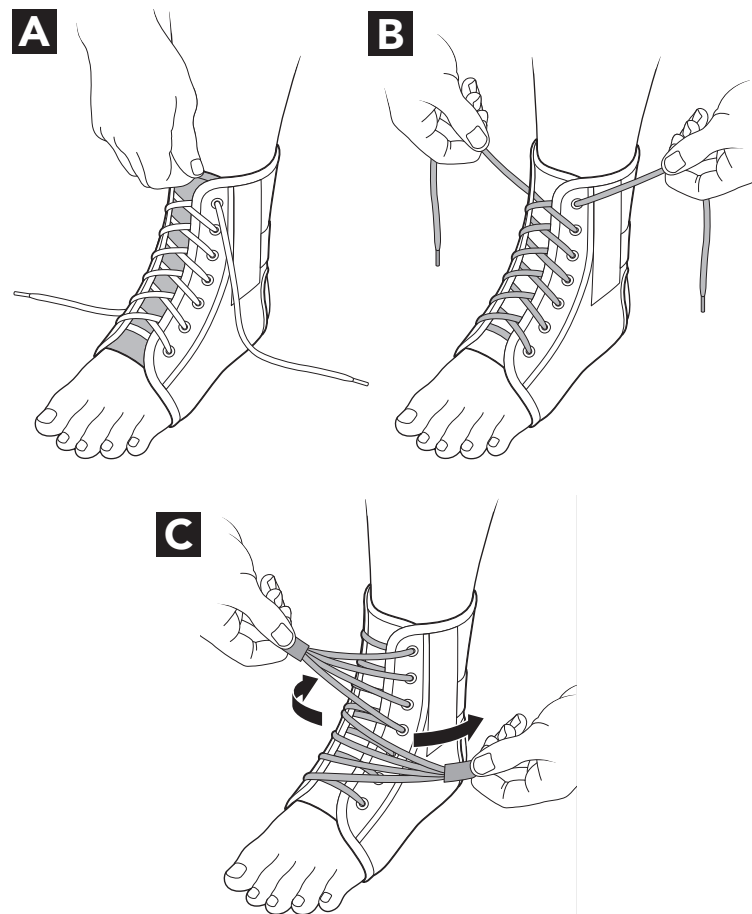

Wraptor Ankle Brace

FITTING INSTRUCTIONS

SWEDISH
DANISH
FINNISH
NORWEGIAN
ROMANIAN
POLISH



Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 U.S.A.
P: 800-321-0607
F: 800-329-2734
www.breg.com
©2020 Breg, Inc. All rights reserved.



E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

AW-1.04054 Rev A 01/21

Om något allvarligt tillbud uppstår i relation till den här ortosen, rapportera till Breg och till den behöriga myndigheten i medlemslandet som användaren och/eller patienten är etablerad i.

Hvis der er indtruffet alvorlige hændelser i forbindelse med anordningen, skal dette rapporteres til Breg og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

